



ウルトラシア
オパーク
ベラバー
クラシック
soソフト
フォーメン アンビション
フォーメン
ベラ ライト
ベラ ストロング
ファローラップ
バンテージ



弾性ストッキングのお手入れ方法

長くお使いいただくために

- 水または40度以下のぬるま湯に市販の中性洗剤を溶かし、洗濯機で洗う場合には洗濯ネットをご使用ください。
- 漂白剤および柔軟剤のご使用は避けてください。
- ドライクリーニングはしないでください。
- 直射日光を避け、陰干しにすること。乾燥機を使用する場合には、60℃以下で使用すること。
- アイロンがけはしないでください。

ご注意：洗濯を他のものと同時にする場合には、色落ちのおそれがあるためご注意ください。

ジョブスト ファローラップのお手入れ方法

長くお使いいただくために

ご注意

・面ファスナーにごみが付着すると粘着力が弱くなるため、面ファスナーを留めた状態で洗濯してください。

(ファローラップ ライト・ファローラップ ストロング・ファロークイック)

- 水または30度以下のぬるま湯に市販の中性洗剤を溶かし、洗濯機で洗う場合には洗濯ネットをご使用ください。
- 漂白剤および柔軟剤のご使用は避けてください。
- タンブル乾燥しないでください。
- できれば平干ししてください。
- アイロンがけはしないでください。
- ドライクリーニングはしないでください。

(ファローラップ クラシック)

- 水または40度以下のぬるま湯に市販の中性洗剤を溶かし、手洗いしてください。
- 漂白剤および柔軟剤のご使用は避けてください。
- タンブル乾燥しないでください。
- できれば平干ししてください。
- アイロンがけはしないでください。
- ドライクリーニングはしないでください。

お取り扱いと保管について

- ・本品は繊維製品です。次のような場合には破損することがありますので、ご注意ください。
 - ①強く引き伸ばしての装着
 - ②鋭利なものへの接触
- ・繊維が傷つくこともあるので面ファスナーの付け外しはゆっくりと丁寧に行ってください。
- ・面ファスナーが思わぬところに付着しての破損または劣化予防のため、保管の際は面ファスナーを留めた状態にしてください。

バンテージのお手入れ方法

長くお使いいただくために

弾性包帯やコットン素材の筒状包帯などは、直接皮膚にふれ、汗を吸い込むものですから、こまめに洗って清潔にしておくよう心掛けてください。

※弾性包帯とコットン素材の包帯では、取扱いが異なりますので、ご注意ください。

弾性包帯

洗濯は香料の少ないせっけん洗剤などをお使いになるようおすすめします。基本的には押し洗いをしますが、ネットに入れて、洗濯機で洗うこともできます。弾性包帯は、汚れや体内からの皮脂や塩分が繊維に入り込むと、伸縮性が低下し、劣化しやすいため、1週間に1回、多くて2~3回くらいの頻度で洗濯してください。*

禁止:弾性繊維の劣化の原因になりますので、以下の取り扱いは避けてください。

-
-
-
-
-



干す際には、一箇所に圧が加わらないように、図のように蛇行させ、包帯の面を平らにして干すようにしてください。直射日光を避け、風通しのよい場所で陰干ししてください。色の違うものと一緒に、つけ置きや洗濯をしないでください。

コットン・ウレタン素材包帯

洗濯機で洗う場合は、劣化を防ぐため、必ずネットに入れてください。

コットン素材の包帯、ウレタンからつくられるスポンジ類は、柔軟剤を使うことができます。

禁止:素材をいためますので、以下の取り扱いは避けてください。

*自着性包帯は除く

JOBST 品種一覧表

弾性ストッキング

ショート ストレッチ	ベラバー2	クラシック3	オパーク1	オパーク2	オパーク3
	ベラストロング	ベラライト	フォーメン アンビション20	フォーメン アンビション30	フォーメン アンビション40
ロング ストレッチ	soソフト20	soソフト30	ウルトラシアア-20	ウルトラシアア-30	
	圧迫圧	15mmHg	~20mmHg~	~30mmHg~	~40mmHg~

各種機能性包帯




「JOBST」はドイツの医療機器メーカー
「BSN medical社」の弾性ストッキングのブランド名です。



JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。


ショートストレッチ
タイプ着用時

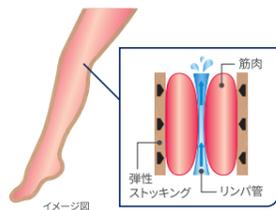

ショートストレッチタイプでは、高いポンプ機能を確保し、筋肉が動く時の血管やリンパ管にかかる圧力を高めるように、弾力性繊維と独自の編み方によって伸びにくい生地を採用しています。

※参考文献: 平井正文 著(2013) データとケースレポートから見た圧迫療法の基本と臨床 [第1版第1刷] 株式会社メディカルトリビューン P58

ロングストレッチ
タイプ着用時

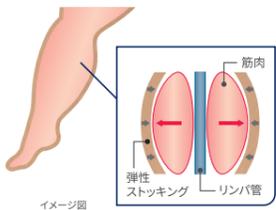

ロングストレッチタイプでは、筋肉の動きに合わせて生地が伸びるため、ポンプ機能は低くなりますが、よく伸びることにより、フィット感にすぐ履きやすく動きやすいという特長があります。

※参考文献: 平井正文 著(2013) データとケースレポートから見た圧迫療法の基本と臨床 [第1版第1刷] 株式会社メディカルトリビューン P39



最大圧
段階的圧迫圧
(足首を最大に徐々に
圧力を弱めています。)



弾性ストッキング
JOBST ウルトラシアア-20・30

20 20-27hPa (15-20mmHg) 30 27-40hPa (20-30mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

履き心地と透明感に優れた「弾性ストッキング」



ハイソックス ソフトフィット
シリコンコーティングされた細い糸と弾性糸を編んだメッシュ生地を膝バンド部内側に採用



ストッキング センシティブグリップ
バンド部の皮膚トラブル低減を目指した仕様のシリコングリップ

JOBST ウルトラシアア-20 品種表

タイプ	ハイソックス ショート	ハイソックス レギュラー	ハイソックス ソフトフィット	ストッキング シリコングリップ付ドット	ストッキング センシティブグリップ	パンティ ストッキング	マタニティ	
つま先タイプ	つま先あり	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先あり	
カラー	シルキー ベージュ	シルキー ベージュ	シルキー ベージュ	シルキー ベージュ	シルキー ベージュ	シルキー ベージュ	シルキー ベージュ	
サイズ	S	M	L	XL	S	M	L	XL
製品コード	JP-U20KSS1	JP-U20KSS	JP-U21KSS	JP-U20KSSF	JP-U21TSS	JP-U20TSSV	JP-U20WSS	JP-U20MSS
希望小売価格 (本体価格・税別)	¥4,730 (¥4,300)	¥4,730 (¥4,300)	¥4,950 (¥4,500)	¥4,950 (¥4,500)	¥5,940 (¥5,400)	¥5,940 (¥5,400)	¥6,380 (¥5,800)	¥10,670 (¥9,700)
	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足	1足

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:JOBST ウルトラシアア 医療機器届出番号:27B1X00006650302

JOBST ウルトラシアア-30 品種表


タイプ	ハイソックス ショート	ハイソックス レギュラー	ハイソックス ソフトフィット	ストッキング シリコングリップ付ドット	ストッキング センシティブグリップ	パンティ ストッキング	マタニティ		
つま先タイプ	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先あり	つま先あり		
カラー	シルキー ベージュ	シルキー ベージュ	シルキー ベージュ	シルキー ベージュ	シルキー ベージュ	シルキー ベージュ	シルキー ベージュ		
サイズ	S	M	L	XL	S	M	L	XL	
製品コード	JP-U30KSS1	JP-U31KSS1	JP-U30KSS	JP-U31KSS	JP-U30KSSF	JP-U31TSS	JP-U30TSSV	JP-U30WSS	JP-U30MSS
希望小売価格 (本体価格・税別)	¥6,490 (¥5,900)	¥6,490 (¥5,900)	¥6,490 (¥5,900)	¥6,490 (¥5,900)	¥7,370 (¥6,700)	¥7,370 (¥6,700)	¥7,810 (¥7,100)	¥11,330 (¥10,300)	
	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足	1足	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:JOBST ウルトラシアア 医療機器届出番号:27B1X00006650302

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)				サイズ記入欄
	S	M	L	XL	
ヒップ(H)	71-117	76-127	81-137	—	
大腿部(G)	40-62	46-70	54-78	60-81	
ふくらはぎ(C)	28-38	30-42	32-46	34-50	
足首(B)	18-21	21-25	25-29	29-33	

<適用股長> ハイソックス 膝下の長さ(LD):レギュラータイプ>38cm、ショートタイプ≤38cm
ストッキング 大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):>68.5cm

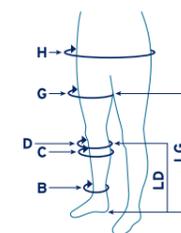



弾性ストッキング ジョブスト オパーク1・2・3

- 1 24-28hPa(18-21mmHg)
- 2 31-43hPa(23-32mmHg)
- 3 45-61hPa(34-46mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求。

- ・ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用
- ・柔らかく、やや厚手の生地を採用

ジョブスト オパーク1 品種表

タイプ		ハイソックス		ストッキング シリコングリップ付ドット		パンティストッキング	
つま先タイプ		つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
ページュ	SS	JP-Q10K1S	JP-Q11K1S	JP-Q10T1S	JP-Q11T1S	JP-Q10W1S	JP-Q11W1S
	S	JP-Q10K2S	JP-Q11K2S	JP-Q10T2S	JP-Q11T2S	JP-Q10W2S	JP-Q11W2S
	M	JP-Q10K3S	JP-Q11K3S	JP-Q10T3S	JP-Q11T3S	JP-Q10W3S	JP-Q11W3S
	L	JP-Q10K4S	JP-Q11K4S	JP-Q10T4S	JP-Q11T4S	JP-Q10W4S	JP-Q11W4S
	2L	JP-Q10K5S	JP-Q11K5S	JP-Q10T5S	JP-Q11T5S	JP-Q10W5S	JP-Q11W5S
ブラック	3L	JP-Q10K6S	JP-Q11K6S	JP-Q10T6S	JP-Q11T6S	JP-Q10W6S	JP-Q11W6S
	SS	JP-Q10K1B	JP-Q11K1B	JP-Q10T1B	JP-Q11T1B	JP-Q10W1B	JP-Q11W1B
	S	JP-Q10K2B	JP-Q11K2B	JP-Q10T2B	JP-Q11T2B	JP-Q10W2B	JP-Q11W2B
	M	JP-Q10K3B	JP-Q11K3B	JP-Q10T3B	JP-Q11T3B	JP-Q10W3B	JP-Q11W3B
	L	JP-Q10K4B	JP-Q11K4B	JP-Q10T4B	JP-Q11T4B	JP-Q10W4B	JP-Q11W4B
2L	JP-Q10K5B	JP-Q11K5B	JP-Q10T5B	JP-Q11T5B	JP-Q10W5B	JP-Q11W5B	
3L	JP-Q10K6B	JP-Q11K6B	JP-Q10T6B	JP-Q11T6B	JP-Q10W6B	JP-Q11W6B	
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥6,820 (¥6,200) 1足(2本)		¥14,520 (¥13,200) 1足(2本)		¥26,400 (¥24,000) 1足	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト オパーク 医療機器届出番号:27B1X00006650905

ジョブスト オパーク2 品種表

タイプ		ハイソックス		ストッキング シリコングリップ付ドット		パンティストッキング		片足ストッキング	
つま先タイプ		つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先なし	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	左	右
ページュ	SS	JP-Q20K1S	JP-Q21K1S	JP-Q20T1S	JP-Q21T1S	JP-Q20W1S	JP-Q21W1S	JP-Q21G1SL	JP-Q21G1SR
	S	JP-Q20K2S	JP-Q21K2S	JP-Q20T2S	JP-Q21T2S	JP-Q20W2S	JP-Q21W2S	JP-Q21G2SL	JP-Q21G2SR
	M	JP-Q20K3S	JP-Q21K3S	JP-Q20T3S	JP-Q21T3S	JP-Q20W3S	JP-Q21W3S	JP-Q21G3SL	JP-Q21G3SR
	L	JP-Q20K4S	JP-Q21K4S	JP-Q20T4S	JP-Q21T4S	JP-Q20W4S	JP-Q21W4S	JP-Q21G4SL	JP-Q21G4SR
	2L	JP-Q20K5S	JP-Q21K5S	JP-Q20T5S	JP-Q21T5S	JP-Q20W5S	JP-Q21W5S	JP-Q21G5SL	JP-Q21G5SR
ブラック	3L	JP-Q20K6S	JP-Q21K6S	JP-Q20T6S	JP-Q21T6S	JP-Q20W6S	JP-Q21W6S	JP-Q21G6SL	JP-Q21G6SR
	SS	JP-Q20K1B	JP-Q21K1B	JP-Q20T1B	JP-Q21T1B	JP-Q20W1B	JP-Q21W1B		
	S	JP-Q20K2B	JP-Q21K2B	JP-Q20T2B	JP-Q21T2B	JP-Q20W2B	JP-Q21W2B		
	M	JP-Q20K3B	JP-Q21K3B	JP-Q20T3B	JP-Q21T3B	JP-Q20W3B	JP-Q21W3B		
	L	JP-Q20K4B	JP-Q21K4B	JP-Q20T4B	JP-Q21T4B	JP-Q20W4B	JP-Q21W4B		
2L	JP-Q20K5B	JP-Q21K5B	JP-Q20T5B	JP-Q21T5B	JP-Q20W5B	JP-Q21W5B			
3L	JP-Q20K6B	JP-Q21K6B	JP-Q20T6B	JP-Q21T6B	JP-Q20W6B	JP-Q21W6B			
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥11,330 (¥10,300) 1足(2本)		¥15,950 (¥14,500) 1足(2本)		¥26,400 (¥24,000) 1足		¥13,640 (¥12,400) 1足	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト オパーク 医療機器届出番号:27B1X00006650905

ジョブスト オパーク3 品種表

タイプ		パンティストッキング		ストッキング シリコングリップ付	
つま先タイプ		つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
ページュ	SS	JP-Q30W1S	JP-Q31W1S	JP-Q31T1S	JP-Q31T1S
	S	JP-Q30W2S	JP-Q31W2S	JP-Q31T2S	JP-Q31T2S
	M	JP-Q30W3S	JP-Q31W3S	JP-Q31T3S	JP-Q31T3S
	L	JP-Q30W4S	JP-Q31W4S	JP-Q31T4S	JP-Q31T4S
	2L	JP-Q30W5S	JP-Q31W5S	JP-Q31T5S	JP-Q31T5S
ブラック	3L	JP-Q30W6S	JP-Q31W6S	JP-Q31T6S	JP-Q31T6S
	SS	JP-Q30W1B	JP-Q31W1B		
	S	JP-Q30W2B	JP-Q31W2B		
	M	JP-Q30W3B	JP-Q31W3B		
	L	JP-Q30W4B	JP-Q31W4B		
2L	JP-Q30W5B	JP-Q31W5B			
3L	JP-Q30W6B	JP-Q31W6B			
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥27,940 (¥25,400) 1足		¥17,050 (¥15,500) 1足(2本)	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト オパーク 医療機器届出番号:27B1X00006650905

弾性ストッキング ジョブスト クラシック3

- 3 45-61hPa(34-46mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

着用しやすさ、動きに追従し適切な圧迫を維持することを目的として伸縮性と回復性のよい糸を採用。

- ・通気性が良くムレにくい

ジョブスト クラシック3 品種表

タイプ		パンティストッキング		片足ストッキング	
つま先タイプ		つま先なし	つま先なし	つま先なし	つま先なし
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
			左	右	
	SS	JP-CL31W1S	JP-CL31G1SL	JP-CL31G1SR	
	S	JP-CL31W2S	JP-CL31G2SL	JP-CL31G2SR	
	M	JP-CL31W3S	JP-CL31G3SL	JP-CL31G3SR	
	L	JP-CL31W4S	JP-CL31G4SL	JP-CL31G4SR	
	2L	JP-CL31W5S	JP-CL31G5SL	JP-CL31G5SR	
	3L	JP-CL31W6S	JP-CL31G6SL	JP-CL31G6SR	
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥30,470 (¥27,700) 1足		¥13,640 (¥12,400) 1足	


*片足ストッキングのベルトは左右ペアで装着可能な形状です。

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト クラシック 医療機器届出番号:27B1X00006651106

オパーク・クラシック採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)						サイズ 記入欄
	SS	S	M	L	2L	3L	
大腿部シリコンバンド(G)	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
大腿部(G)	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
大腿中央部(F)	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
膝蓋骨(E)	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
腓骨頭(D)	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
ふくらはぎ(C)	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
ふくらはぎ下部(B1)	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
足首(B)	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
足関節(Y)	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
つま先(A)	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	

<適用股長> ハイソックス 膝下の長さ(LD):34-39cm、ストッキング 脚の長さ(LG):60-69cm、パンティストッキング/片足ストッキング 股下の長さ(LK):65-75cm

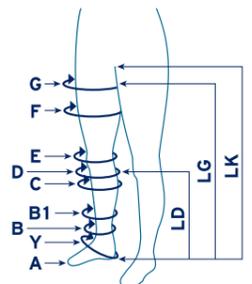



弾性ストッキング ジョブスト ベラバー-2

2 31-43hPa (23-32mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために
必要な圧迫圧が持続。

ジョブスト ベラバー-2 品種表


タイプ	ストッキング (シリコンなし)		パンティストッキング		片足ストッキング		片足パンティストッキング	
	つま先タイプ	つま先なし	つま先なし	つま先なし	つま先なし	つま先なし	つま先なし	つま先なし
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
サハラ				左	右	左	右	
	2(S)	JP-BL2TH2S	JP-BL2WS2S	JP-BL2CS2SL	JP-BL2CS2SR	JP-BL2KS2SL	JP-BL2KS2SR	
	3(M)	JP-BL2TH3S	JP-BL2WS3S	JP-BL2CS3SL	JP-BL2CS3SR	JP-BL2KS3SL	JP-BL2KS3SR	
	4(ML)	JP-BL2TH4S	JP-BL2WS4S	JP-BL2CS4SL	JP-BL2CS4SR	JP-BL2KS4SL	JP-BL2KS4SR	
	5(L)	JP-BL2TH5S	JP-BL2WS5S	JP-BL2CS5SL	JP-BL2CS5SR	JP-BL2KS5SL	JP-BL2KS5SR	
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥15,950 (¥14,500) 1足(2本)	¥32,670 (¥29,700) 1足	¥13,640 (¥12,400) 1足		¥31,350 (¥28,500) 1足		

一般名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラバー 医療機器届出番号:27B1X00006652915

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)				サイズ記入欄
	2(S)	3(M)	4(ML)	5(L)	
大腿部(G)	46-48	50-52	54-56	58-60	
大腿中央部(F)	42-44	45-47	48-50	51-53	
膝蓋骨(E)	32-34	35-37	38-40	41-43	
腓骨頭(D)	29-31	32-34	35-37	38-40	
ふくらはぎ(C)	31-33	34-36	37-39	40-42	
ふくらはぎ下部(B1)	25-26	27-28	29-30	31-32	
足首(B)	20-21	22-23	24-25	26-27	
足関節(Y)	29-30	31-32	33-34	35-36	
つま先(A)	20-21	22-23	24-25	26-27	

股下の長さ(LK):70-75cm 大腿部までの長さ(LG):69-74cm

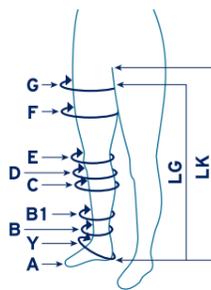

弾性ストッキング ジョブスト soソフト20・30

20 19-29hPa (14-22mmHg)

30 27-40hPa (20-30mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

ふだん使いもできる靴下風仕上げ

- 汗を素早く吸収し、蒸散させてムレにくい素材。
- 柔らかくて履きやすい独自の織り糸加工。


品種表

		soソフト20	soソフト30
タイプ		ハイソックス	
つま先タイプ		つま先あり	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード
アイボリー	S	JP-SF20KSVC	JP-SF30KSVC
	M	JP-SF20KMVC	JP-SF30KMVC
	L	JP-SF20KLVC	JP-SF30KLVC
ブラック	S	JP-SF20KSBR	JP-SF30KSBR
	M	JP-SF20KMBR	JP-SF30KMBR
	L	JP-SF20KLBR	JP-SF30KLBR
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥5,390 (¥4,900) 1足(2本)	¥6,820 (¥6,200) 1足(2本)

一般名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト soソフト 医療機器届出番号:27B1X00006650503

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)			サイズ記入欄
	S	M	L	
ふくらはぎ(C)	28-38	30-42	32-46	
足首(B)	18-21	21-25	25-29	

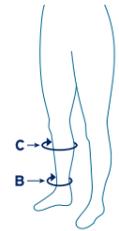

着圧ソックス ジョブスト ライトウェア

11-20hPa (8-15mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

柔らかく自然な履き心地の着圧ソックス

- 膝下部の食い込みを防ぐため、バンドを太くゆったり編みました。
- 吸水性が高く、快適な履き心地です。

段階的
圧力設計
足首(最大)
20hPa
(15mmHg)



品種表

		soソフト20	soソフト30
タイプ		ハイソックス 男女兼用	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード
ブラック	S	JP-LWS10KSBR	JP-LWS10KMVR
	M	JP-LWS10KMBR	JP-LWS10KMLVR
	L	JP-LWS10KLBR	JP-LWS10KMLVR
アイボリー	S	JP-LWS10KSBR	JP-LWS10KMSVR
	M	JP-LWS10KMVR	JP-LWS10KMSVR
	L	JP-LWS10KLVR	JP-LWS10KMSVR
ホワイト	S	JP-LWS10KSWR	JP-LWS10KMSWR
	M	JP-LWS10KMWR	JP-LWS10KMSWR
	L	JP-LWS10KLWR	JP-LWS10KMSWR
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥3,410 (¥3,100) 1足(2本)	

ジョブスト ライトウェアは医療機器ではありません。

サイズ表

靴のサイズでお選びください。			サイズ記入欄
S	M	L	
21.5~23.5cm	24.0~26.0cm	26.5~28.0cm	



弾性ストッキング ジョブスト フォーメン アンビション20・30・40

20	20-27hPa (15-20mmHg)	30	27-40hPa (20-30mmHg)
40	40-53hPa (30-40mmHg)		

数値は足首部の圧迫圧です。


男性のライフスタイルや足形を考慮した弾性ストッキング。

- ・ニオイとムレを軽減するために、コットンと活性炭を含む生地を採用。



採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)					サイズ 記入欄
	SS	S	M	L	2L	
ふくらはぎ(C)	28-36	30-40	34-44	38-50	44-56	
足首(B)	18-20	20-22	22-24	24-27	27-30	

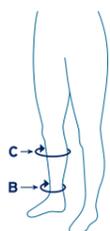

品種表		フォーメン アンビション20	フォーメン アンビション30	フォーメン アンビション40
タイプ		ハイソックス		
つま先タイプ		つま先あり		
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード
ブラック	SS	JP-A20K1B	JP-A30K1B	JP-A40K1B
	S	JP-A20K2B	JP-A30K2B	JP-A40K2B
	M	JP-A20K3B	JP-A30K3B	JP-A40K3B
	L	JP-A20K4B	JP-A30K4B	JP-A40K4B
	2L	JP-A20K5B	JP-A30K5B	JP-A40K5B
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥5,830 (¥5,300)	¥8,140 (¥7,400)	¥10,340 (¥9,400)
		1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト フォーメン アンビション 医療機器届出番号:27B1X00006652312

ジョブストフォーメンアンビション20・30・40



弾性ストッキング ジョブスト フォーメン 30・40

30	27-40hPa (20-30mmHg)	40	40-53hPa (30-40mmHg)
----	----------------------	----	----------------------


数値は足首部の圧迫圧です。

ふとももまでサポートするメンズタイプ

- ・蒸れにくいマルチファイバー使用。
- ・ニオイを低減する防臭加工。

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)			サイズ 記入欄
	S	M	L	
大腿部(G)	40-62	46-70	54-78	
ふくらはぎ(C)	28-38	30-42	32-46	
足首(B)	18-21	21-25	25-29	

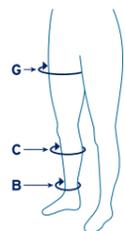

品種表		フォーメン30	フォーメン40
タイプ		ストッキング シリコングリップ付ドット	
つま先タイプ		つま先あり	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード
ブラック	S	JP-MB200SB	JP-MC200SB
	M	JP-MB200MB	JP-MC200MB
	L	JP-MB200LB	JP-MC200LB
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥13,530 (¥12,300)	¥14,080 (¥12,800)
		1足(2本)	1足(2本)

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト フォーメン 医療機器届出番号:27B1X00006652111

ショートストレッチタイプの履き方・脱ぎ方

- はじめに**
- ・たぐらないでください。履きづらくなります。
 - ・必ず座って履いてください。立ちながら履くと、転倒するおそれがあります。
 - ・ゴム手袋を着用してください。

履き方

1 ストッキングの中に手を入れ、親指と人差し指でストッキングのかかと部をつまみます。

2 ストッキングを丸めないように徐々に裏返していきます。かかと部をつまんだまま、ストッキングを裏返します。

3 つま先なしの場合はフットスリップを履き、裏返したストッキングの内側を両手で広げ、つま先を奥に入れます。

4 次にかかとまで履きます。ストッキングを束にしないことが着用時のコツです。

5 かかどが正しく収まっていることを確認し、足首までしっかりと入れます。

6 十分伸ばしながら少しずつたくし上げ、生地を皮膚に置いていくように着用します。フットスリップを抜き取ります。

7 生地が一箇所にたまるないようにしながら、ねじれ・たるみ・しわに注意しつつ、着用します。

8 最後に全体をなでて整え、踵部が正しい位置に収まっていることを確認します。

脱ぎ方

履いたときと逆の手順で、ストッキングの裏地をつかむようにして、段階的に引き下げます。

ロングストレッチタイプの履き方・脱ぎ方

- はじめに**
- ・たぐらないでください。履きづらくなります。
 - ・必ず座って履いてください。立ちながら履くと、転倒するおそれがあります。

履き方

1 ストッキングの中に手を入れ、かかとの部分を内側から軽くつまみます。

2 ストッキングを丸めないように裏返していきます。

3 つまんだかかと部分まで裏返します。

4 つま先なしの場合はフットスリップを履きます。

5 つま先を奥に入れかかとまで履きます。


6 かかとの少し上を持ち、足首まで履きます。

7 ねじれ・たるみ・しわに注意しながら、少しずつたくしあげます。

8 最後に全体をなでて整えます。つま先の空いている部分からフットスリップを抜き取ります。

着用時のコツ

着脱の際は生地を束にしない

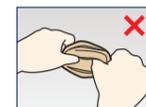


一般のストッキングのように弾性ストッキングを何重にも束ねると、硬く、伸びにくくなるため、着用できません。

縦ではなく、横に引っ張りながら、着用する
弾性ストッキングはその名の通り、伸びるストッキングです。縦に引っ張りながら着用すると、膝の上まで生地がきつてしまいます。



<ハイソックスタイプの例>

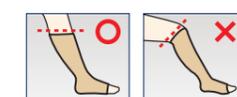

膝上まで生地がきつている

脱ぎ方

1 ストッキングの生地を一枚持ち、足首まで脱ぎます。

2 足首部まで脱げたら指を入れ、かかとを乗り越えます。

3 生地は束にせず、引っ張りながらつま先部分を脱ぎます。



弾性スリーブ ジョブスト ベラライト アームスリーブ

27-40hPa (20-30mmHg)

*前腕部

はじめてお使いの方におすすめのソフトな肌ざわり。

- ・面倒なベルト装着がなく、扱いやすい形です。
- ・S、M、Lの3種類のサイズが揃っています。
- ・グローブタイプと合わせてお使いいただけます。


品種表

タイプ		アームスリーブ
カラー	サイズ	製品コード
ベージュ	S	JP-LAS2
	M	JP-LAS3
	L	JP-LAS4
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥9,900 (¥9,000) 1本

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラライト 医療機器届出番号:27B1X00006652714

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)			サイズ 記入欄
	S	M	L	
手首(C)	14-20	16-22	18-24	
前腕部(D)	18-23	23-29	29-34	
上端部(G)	22-40	27-45	33-51	

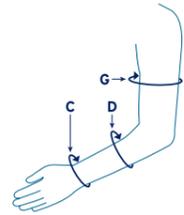

弾性スリーブ ジョブスト ベラ ストロング アームスリーブ

27-40hPa (20-30mmHg)

*前腕部

やや厚手の生地ですっきりしたフィット感。

- ・筋ポンプ作用の増強を目指し、伸びの小さい生地を採用しています。
- ・手首部分に過度な圧がかからないよう圧迫圧のピークを前腕部にしました。


品種表

タイプ		アームスリーブ
カラー	サイズ	製品コード
ベージュ	SS	JP-SAS1
	S	JP-SAS2
	M	JP-SAS3
	L	JP-SAS4
	LL	JP-SAS5
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥11,330 (¥10,300) 1本

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラ ストロング 医療機器届出番号:27B1X00006652513

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)					サイズ 記入欄
	SS	S	M	L	LL	
手首(C)	14-18	14-18	14-18	17-20	19-22	
前腕部(D)	17-21	21-25	25-29	25-29	29-33	
上端部(G)	22-31	25-34	29-38	33-43	36-46	

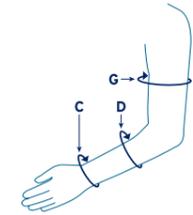

弾性スリーブ ジョブスト ベラライト グローブ

27-40hPa (20-30mmHg)

*掌部

アームスリーブと合わせて装着可能。

- ・S、M、Lの3種類のサイズが揃っています。


品種表

タイプ		グローブ ミトン型
カラー	サイズ	製品コード
ベージュ	S	JP-LGL2
	M	JP-LGL3
	L	JP-LGL4
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥8,580 (¥7,800) 1本

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラライト 医療機器届出番号:27B1X00006652714

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)			サイズ 記入欄
	S	M	L	
掌(B)	15-19	19-22	22-26	
手首(C)	14-20	16-22	18-24	

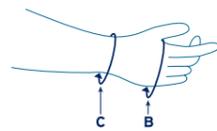

弾性スリーブ ジョブスト ベラ ストロング グローブ

27-40hPa (20-30mmHg)

*掌部

アームスリーブと合わせて装着可能。

- ・ミトン型と指付きグローブが揃っています。
- ・指付きグローブは平編みで縫い目のないシームレスタイプです。


品種表

タイプ		ミトン型 グローブ	指付き グローブ
カラー	サイズ	製品コード	製品コード
ベージュ	S	JP-SGL2	JP-SGF2
	M	JP-SGL3	JP-SGF3
	L	JP-SGL4	JP-SGF4
	LL		JP-SGF5
	希望小売価格 (本体価格・税別)	¥8,580 (¥7,800) 1本	¥19,250 (¥17,500) 1本

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラ ストロング 医療機器届出番号:27B1X00006652513

採寸表

タイプ	適用周囲長 (単位:cm)				サイズ 記入欄
	S	M	L	LL	
ミトン型					
サイズ	S	M	L		
掌(B)	17-19	19-21	21-23		
手首(C)	14-18	18-21	19-22		
指付き					
サイズ	S	M	L	LL	
掌(B)	16.6-18.0	18.0-19.5	19.5-21.5	21.5-23.1	
手首(C)	16.7-18.1	17.0-18.5	17.2-18.7	18.3-20.1	

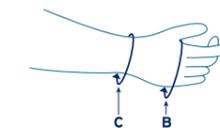

ジョブスト® ファローラップ

多層包帯と比較して関節の動きを妨げにくい形状になっています。



巻き付けて面ファスナーで固定するので着脱がしやすい弾性着衣です。




筋ポンプ作用の増強を目指したショートストレッチ生地を採用しています。



洋服の下でもかさ張りにくいデザインです。



面ファスナーで固定するのでご自身で調節が可能です。

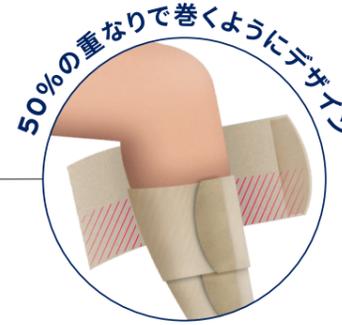

ショートストレッチ弾性包帯による多層包帯法の圧迫を再現するため50%の重なりで巻くようデザインしました。層と層の間に隙間や皮膚の挟まり(くい込み)がなく、全体を圧迫することができます。

装着部位別に3つのタイプがあります。




フットピース



レッグピース

*ライナー付き

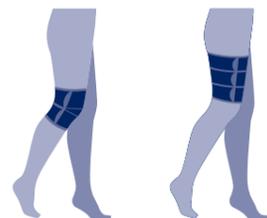

サイピース

ひざ用パーツ 大腿用パーツ
*ライナー付き

2種類の圧迫

27hPa~40hPa(20~30mmHg) *足首部の圧迫	ライト
40hPa~53hPa(30~40mmHg) *足首部の圧迫	ストロングクラシック ファロークイック

部位ごとに分かれており、組み合わせて使用します。

注: サイピースは大腿用パーツとひざ用パーツのセットです。
レッグピースとサイピースにはそれぞれライナーが付属しています。

巻き付けて装着する製品が便利なケース



サイズが大きく弾性着衣の選択が困難な方、またはくい込みやすく弾性着衣の装着が困難な方



創傷があり、弾性着衣の装着が困難な方




弾性着衣の装着に介助が必要な方


装着方法

予めライナーを装着します。


フットピースの装着

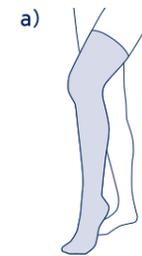


装着部位に応じて、レッグピース付属ライナー、サイピース付属ライナー、ファローハイブリッドライナーのいずれかをご使用ください。

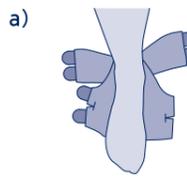


フットピースの穴にかかとを合わせ、装着位置を調整します。

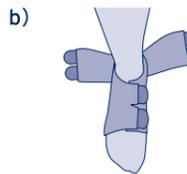

足の部分のベルトを軽く伸展させながら面ファスナーで固定します。

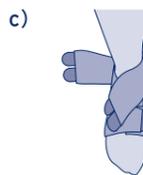


足首側のベルトを軽く伸展させながら面ファスナーで固定します。

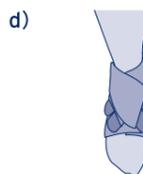


同様にもう1枚のベルトをクロスするように固定し、位置を調整します。


レッグピースの装着

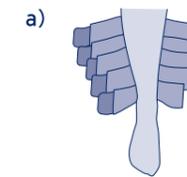

装着位置を確認します。

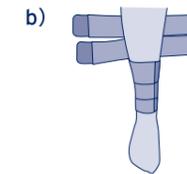

足首側から順番に各ベルトを軽く伸展させながら面ファスナーで固定します。

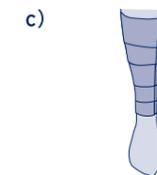

全てのベルトを固定し、しっかり面ファスナーが密着するように全体を押さえます。

サイピースの装着

①大腿用パーツ



タグが付いている方が大腿付け根側になるように装着位置を調整します。



ひざ側のベルトを軽く伸展させながら面ファスナーで固定します。



大腿部側のベルトも同様に固定します。

②ひざ用パーツ



ひざ用パーツのひざ裏に当たる部分にはクッションとしてウレタンシートが入っています。必要に応じて取り外しが可能です。



タグが付いている方が大腿部(上)側になるようにし、膝関節を覆うように中央(内側)のベルトを軽く伸展させながら面ファスナーで固定します。



ひざ下側のベルト、ひざ上側のベルトを同様に固定し、位置を調整します。

品種表


ジョブスト ファローラップ ライト

27~40hPa(20~30mmHg)

- ・ 軽めの圧迫圧
- ・ ファローラップの中で一番薄く柔らかい生地です。



※写真はハイブリッドライナーを着用しています。

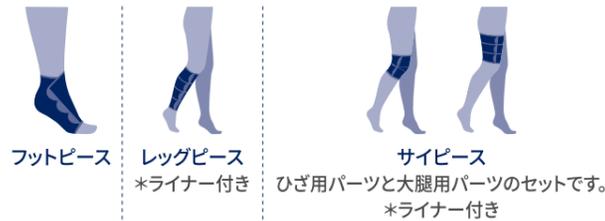


ジョブスト ファローラップ ストロング

40~53hPa(30~40mmHg)

- ・ 強めの圧迫圧
- ・ 厚さがありしっかりした生地です。



※写真はハイブリッドライナーを着用しています。

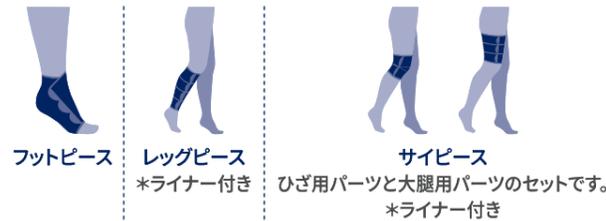


ジョブスト ファローラップ クラシック

40~53hPa(30~40mmHg)

- ・ 強めの圧迫圧
- ・ ストロングより硬く、折れにくいいため変形がある下肢にもくい込みにくい生地です。



※写真はハイブリッドライナーを着用しています。

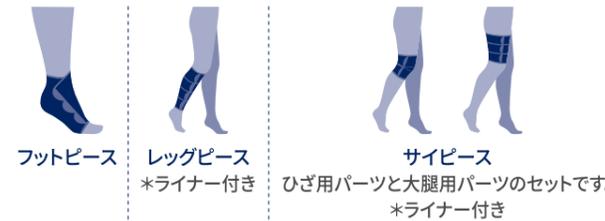

27~40hPa(20~30mmHg) ※足首部				
製品コード	タイプ	長さ	サイズ	包装単位/袋 希望小売価格 (本体価格・税別)
JP-FWLRF1	フットピース	レギュラー	XS	1個 13,970円 (12,700円)
JP-FWLRF2			S	
JP-FWLRF3			M	
JP-FWLRF4			L	
JP-FWLRF5			XL	
JP-FWLRK1	レッグピース	レギュラー	XS	1個 24,860円 (22,600円)
JP-FWLRK2			S	
JP-FWLRK3			M	
JP-FWLRK4			L	
JP-FWLRK5			XL	
JP-FWLST1A	サイピース	ショート	XS	1個 31,020円 (28,200円)
JP-FWLST2A			S	
JP-FWLST3A			M	
JP-FWLST4A			L	
JP-FWLST5A			XL	
JP-FWLRT1A	サイピース	レギュラー	XS	1個 31,020円 (28,200円)
JP-FWLRT2A			S	
JP-FWLRT3A			M	
JP-FWLRT4A			L	
JP-FWLRT5A			XL	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ファローラップ ライト 医療機器届出番号:27B1X00006651910

40~53hPa(30~40mmHg) ※足首部				
製品コード	タイプ	長さ	サイズ	包装単位/袋 希望小売価格 (本体価格・税別)
JP-FWSRF1	フットピース	レギュラー	XS	1個 13,970円 (12,700円)
JP-FWSRF2			S	
JP-FWSRF3			M	
JP-FWSRF4			L	
JP-FWSRF5			XL	
JP-FWSRK1	レッグピース	レギュラー	XS	1個 27,940円 (25,400円)
JP-FWSRK2			S	
JP-FWSRK3			M	
JP-FWSRK4			L	
JP-FWSRK5			XL	
JP-FWSST1A	サイピース	ショート	XS	1個 31,020円 (28,200円)
JP-FWSST2A			S	
JP-FWSST3A			M	
JP-FWSST4A			L	
JP-FWSST5A			XL	
JP-FWSRT1A	サイピース	レギュラー	XS	1個 31,020円 (28,200円)
JP-FWSRT2A			S	
JP-FWSRT3A			M	
JP-FWSRT4A			L	
JP-FWSRT5A			XL	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ファローラップ ストロング 医療機器届出番号:27B1X00006651709

40~53hPa(30~40mmHg) ※足首部				
製品コード	タイプ	長さ	サイズ	包装単位/袋 希望小売価格 (本体価格・税別)
JP-FWCRF1	フットピース	レギュラー	XS	1個 13,970円 (12,700円)
JP-FWCRF2			S	
JP-FWCRF3			M	
JP-FWCRF4			L	
JP-FWCRF5			XL	
JP-FWCRK1	レッグピース	レギュラー	XS	1個 27,940円 (25,400円)
JP-FWCRK2			S	
JP-FWCRK3			M	
JP-FWCRK4			L	
JP-FWCRK5			XL	
JP-FWCST1A	サイピース	ショート	XS	1個 31,020円 (28,200円)
JP-FWCST2A			S	
JP-FWCST3A			M	
JP-FWCST4A			L	
JP-FWCST5A			XL	
JP-FWCRT1A	サイピース	レギュラー	XS	1個 31,020円 (28,200円)
JP-FWCRT2A			S	
JP-FWCRT3A			M	
JP-FWCRT4A			L	
JP-FWCRT5A			XL	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ファローラップ クラシック 医療機器届出番号:27B1X00006651508

レッグピース、サイピースにはそれぞれライナーが付属します。

レッグピース付属ライナー



ジョブスト ファローラップ各種レッグピースに付属しています。*ライト、ストロング、クラシック共通、ベージュつま先あり形状、ひざ上までの長さです。(2本入り *製品のサイズにより2サイズございます。)

サイピース付属ライナー



ジョブスト ファローラップ各種サイピースに付属しています。*ライト、ストロング、クラシック共通、つま先から大腿部まで覆える長さの厚手タオル地の筒状包装です。(2本入り *製品のサイズにより2サイズございます。)

ファロー製品・同梱ライナー対照表

形状	製品サイズ	ライナーサイズ	ライナー周径	入り数
レッグピース 付属ライナー	XS,S	Sサイズ	15-58cm	2本
	M,L,XL	Lサイズ	52-70cm	2本
サイピース 付属ライナー	XS	Mサイズ	40-70cm	2本
	S,M,L,XL	Lサイズ	70-120cm	2本

*ライト、ストロング、クラシック共通



ジョブスト ファロークイック

40~53hPa(30~40mmHg)

- ・強めの圧迫圧
- ・スリーブと4つのベルトで簡単に装着できます。
- ・別売りのハイブリッドライナーと合わせて使用します。それにより、足先からひざ下まで圧迫ができます。
- ・ファローラップ各種のフットピース、サイピースと組み合わせて使用することが可能です。

※写真はハイブリッドライナーを着用しています。



40~53hPa(30~40mmHg) ※足首部			
製品コード	タイプ	サイズ	包装単位/袋 希望小売価格 (本体価格・税別)
JP-FW4RK1	レッグピース	XS	1個 15,620円 (14,200円)
JP-FW4RK2		S	
JP-FW4RK3		M	
JP-FW4RK4		L	





一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ファロークイック
医療機器届出番号:27B1X00006651307



ジョブスト ハイブリッドライナー (別売り)

- ・足先～足首間に27hPa～40hPa(20~30mmHg)の圧迫圧がかかります。
- ・ファローラップ各種と組み合わせて使用することが可能です。

製品コード	タイプ	サイズ	包装単位/袋 希望小売価格 (本体価格・税別)
JP-FLHK2	標準	S	2本 3,080円 (2,800円)
JP-FLHK3		M	
JP-FLHK4		L	
JP-FLHK5		XL	
JP-FLHK2W	ワイド	S	2本 3,080円 (2,800円)
JP-FLHK3W		M	
JP-FLHK4W		L	
JP-FLHK5W		XL	

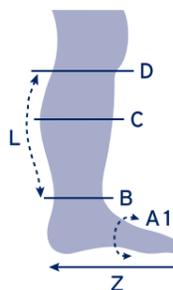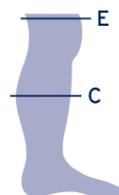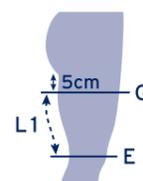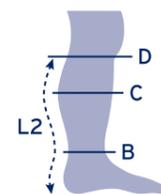

ファローラップ採寸表

フットピース

(単位:cm)

	サイズ	XS	S	M	L	XL
レギュラー	足背周径(A1)	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
	踵から土踏まず前までの長さ(L3)	16-17	17-18	19-20	20-21	22-23

レッグピース

(単位:cm)

	サイズ	XS	S	M	L	XL
レギュラー	ふくらはぎ周径(C)	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68
	足首周径(B)	21-25	25-30	30-36	36-42	42-50
	膝下の長さ(L2)	33-37	35-39	37-41	39-43	39-43

サイピース 大腿用パーツ

(単位:cm)

	サイズ	XS	S	M	L	XL
共通	股下周径(G)	60-70	65-75	70-80	75-90	85-100
	膝上周径(E)	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80
ショート	膝上から股下の長さ(L1)	16-20				
レギュラー	膝上から股下の長さ(L1)	21-26				

サイピース ひざ用パーツ

(単位:cm)

	サイズ	XS	S	M	L	XL
共通	膝上周径(E)	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80
	ふくらはぎ周径(C)	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68

ファロークイック採寸表

(単位:cm)

サイズ	XS	S	M	L
ふくらはぎ(C)	25-38	32-48	37-56	43-67
足首(B)	17-23	19-28	25-37	29-43
足首から膝下の長さ(L)	30-33			

ハイブリッドライナー採寸表

(単位:cm)

サイズ	S	M	L	XL
ふくらはぎ周径(C)	≦60			
足長(Z)	21-24	24-26	26-28	28-31

	標準タイプ	ワイドタイプ
足周径(A1)	20-27cm	28-35cm

足周径(A1)が20-27cmは標準タイプ、28-35cmはワイドタイプをご使用ください。

各種機能バンデージ

指包帯 (ガーゼ包帯) エラストムル

手足の指の可動に対応する設計。



サイズ*	希望小売価格 (本体価格・税別)	製品コード
4cm×4m	20ロール/箱 ¥4,840 (¥4,400)	JW-EM02094
6cm×4m	20ロール/箱 ¥5,940 (¥5,400)	JW-EM02095

筒状包帯 トリコフィックス

汗を吸収し、皮膚を保護。
100%コットン素材で、
ソフトな肌ざわり。



6cm×20m	1ロール/箱 ¥3,740 (¥3,400)	JC-TF02195
8cm×20m	1ロール/箱 ¥4,290 (¥3,900)	JC-TF02197
10cm×20m	1ロール/箱 ¥4,950 (¥4,500)	JC-TF02198
12cm×20m	1ロール/箱 ¥5,720 (¥5,200)	JC-TF02199

パディング包帯 アーティフレックス

皮膚を保護。
ウレタンフォーム等の固定。



10cm×3m	30ロール/箱 ¥22,770 (¥20,700)	JC-AF09046
15cm×3m	20ロール/箱 ¥20,680 (¥18,800)	JC-AF09047

低伸縮弾性包帯 コンプリラン

運動時の高圧迫力と静止時の
低圧迫力を可能にする
ショートストレッチ包帯。



6cm×5m	1ロール/箱 ¥1,210 (¥1,100)	JP-CR01026
8cm×5m	1ロール/箱 ¥1,650 (¥1,500)	JP-CR01027
10cm×5m	1ロール/箱 ¥1,980 (¥1,800)	JP-CR01028
12cm×5m	1ロール/箱 ¥2,310 (¥2,100)	JP-CR01029

バンデージ固定包帯 イデアルビンデ

下肢の各バンデージ類を固定時に使用。

20cm×5m	6ロール/箱 ¥13,200 (¥12,000)	JC-IB01959
---------	-----------------------------	------------

ウレタンロール コンプリフォーム

皮膚を保護し、バンデージの
圧力を均一に分散。



10cm×2.5m	1ロール/箱 ¥2,530 (¥2,300)	JC-CF75294
12cm×2.5m	1ロール/箱 ¥2,860 (¥2,600)	JC-CF75295

*伸ばした状態での長さになります。

筒状包帯 デルタ テリーネットS

チューブ状で衣類のように
装着可能。
タオル地のような肌触り。



サイズ*	希望小売価格 (本体価格・税別)	製品コード
5cm×13.5m	1本/箱 ¥9,020 (¥8,200)	JC-TN050
7.5cm×13.5m	1本/箱 ¥11,660 (¥10,600)	JC-TN075
10cm×13.5m	1本/箱 ¥15,950 (¥14,500)	JC-TN100
12.5cm×13.5m	1本/箱 ¥19,360 (¥17,600)	JC-TN125
15cm×13.5m	1本/箱 ¥23,320 (¥21,200)	JC-TN150

筒状包帯 テソグリップ

軽度の伸縮性がある
チューブ状の包帯なので、
衣類のように履くだけで装着が可能。



7.5cm×10m	1本/箱 ¥7,810 (¥7,100)	JC-TG0750
8.75cm×10m	1本/箱 ¥8,140 (¥7,400)	JC-TG0875
10cm×10m	1本/箱 ¥8,580 (¥7,800)	JC-TG1000
12cm×10m	1本/箱 ¥11,660 (¥10,600)	JC-TG1200
17.5cm×10m	1本/箱 ¥14,740 (¥13,400)	JC-TG1750

自着性高圧迫力弾性包帯 コンプリハフト

運動時の高圧迫力と静止時の
低圧迫力を可能にする
ショートストレッチ包帯。
包帯同士が互いにくっつく自着性が
あり、ずれやゆるみがおきにくい。



8cm×5m	1ロール/箱 ¥2,310 (¥2,100)	JP-CH45958
10cm×5m	1ロール/箱 ¥2,640 (¥2,400)	JP-CH45959

自着性不織布弾性包帯 コープラス

ナイロン不織布と弾力糸から成る
自着性弾力包帯。
包帯同士が互いにくっつく自着性が
あり、ずれやゆるみがおきにくい。



2.5cm×3.0m	60ロール/箱 ¥44,220 (¥40,200)	JW-CP721006
5.0cm×3.0m	36ロール/箱 ¥39,600 (¥36,000)	JW-CP721008
7.5cm×3.0m	24ロール/箱 ¥34,320 (¥31,200)	JW-CP721009
10.0cm×3.0m	18ロール/箱 ¥33,660 (¥30,600)	JW-CP721004

*伸ばした状態での長さになります。