

止血用パッド

Algisave®

アルギセーブ®

一般医療機器

届出番号: 27B1X00006575812

販売名: アルギセーブ

ガンマ線滅菌済



新発売 1枚入タイプ

アルギン酸カルシウム繊維を用いた
止血用パッド



医療従事者向け

血液、浸出液などの体液を吸収してゲル化する

アルギン酸カルシウム繊維を用いた止血用パッドです。

透析療法終了後等の穿刺部分への圧迫止血にご使用いただけます。

Algisave®

アルギーセーブ®

製品サイズ



〔アルギン酸カルシウムとは〕

アルギン酸カルシウム不織布は水には溶けず、血液や体液を吸収してゲル化し、使用部位の湿潤環境を保つことが可能です。

※原料であるアルギン酸は、世界各地の海洋で取れるコンブやワカメに代表される褐藻類で、食品・医薬品・化粧品・繊維加工、その他広い用途に活用されています。


使用方法

1




本製品を清潔に取り出してください。

2

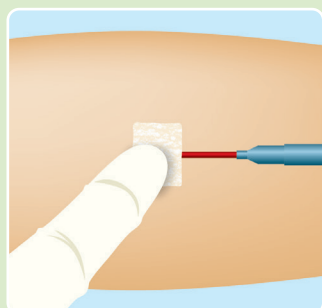


本製品を直接穿刺部位に押し当て、針・カテーテル等を抜去してください。

3

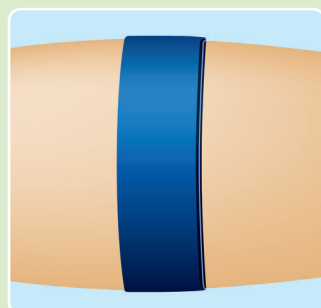

止血が完了するまで、施設ごとの手順に従い、圧迫止血を継続してください。
使用中は止血の状態を適時確認し、圧迫の程度を調整してください。

4

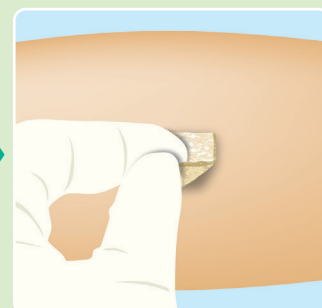

本製品を除去するときは、穿刺部に負担がかからないように、端からゆっくりと除去してください。
除去が困難な場合は、本製品を生理食塩水等でぬらし、少しずつはがしてください。
穿刺部に本製品が残った場合は、生理食塩水等で、洗い流してください。

how to use

コードNo.	品名	規格	標準価格	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位:mm) / 重量	JANコード	
021-800000-00	アルギーセーブ®	1.5cm×2.0cm 2枚	オープン	50袋/箱×4箱	箱	105×165×82 / 約90g	4 987601 538315
					梱	115×350×175 / 約650g	
NEW 021-800003-00	アルギーセーブ®	1.5cm×2.0cm 1枚	オープン	50袋/箱×4箱	箱	105×165×82 / 約90g	4 987601 573279
					梱	115×350×175 / 約650g	

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

●お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)
<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

(本社) 06(6943)8213

(名古屋) 052(253)6213

(東京) 03(6666)6134

(広島) 082(554)1617

(福岡) 092(402)1875

●ご注文・お問い合わせは