

PPE 関連製品

# アイシールド<sup>®</sup> カラーフレーム クリアレンズ



使用前も使用中も  
クリアな視界を保つ  
使い切りアイシールド



5 Color  
variation

# 製品特長

人や用途で使い分けが可能な5色展開



クリアな視界を維持する防曇加工

飛沫物を拭き取りやすい滑らかな表面




使用直前まで指紋の付着や傷を防ぐ両面保護フィルム付き



※保護フィルムは緑色です。


## レンズをキレイに取り付けるためのポイント

1

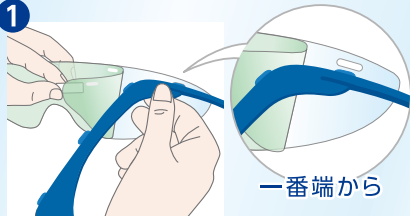


片側(内側)のレンズ保護フィルムを少しはがし、レンズの穴をフレームの突起に取り付けます。

2

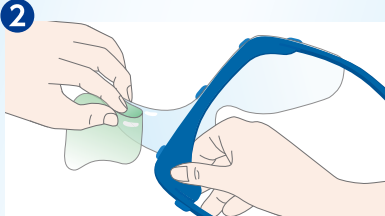

レンズ保護フィルムをはがしながら、全てのレンズの穴をフレームの突起に取り付けてください。レンズ保護フィルムをはがした後、レンズに触れないよう注意してください。

3

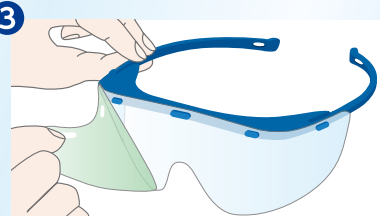

全てのレンズの穴をフレームの突起に取り付けた後に、もう片面(外側)のレンズ保護フィルムをはがしてください。

コードNo.	品名	標準価格	包装	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位:mm)／重量	JANコード/ITFコード
027-173000-00	アイシールド カラーフレーム	7,500円	5本(5色×1本)/袋×10袋	8箱	箱	150×190×180
					梱	約640g
027-173010-00	アイシールド クリアレンズ	27,000円	30枚/袋×10袋	8箱	箱	325×405×370
					梱	約6.0kg
027-173010-00	アイシールド クリアレンズ	27,000円	30枚/袋×10袋	8箱	箱	100×260×90
					梱	約1,000g
027-173010-00	アイシールド クリアレンズ	27,000円	30枚/袋×10袋	8箱	箱	225×380×280
					梱	約8.6kg

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

**川本産業株式会社**

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

● お客様相談窓口 ☎ 06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)

https://www.kawamoto-sangyo.co.jp

(本 社) 06(6943)8213

(名古屋) 052(253)6213

(東 京) 03(6666)6134

(広 島) 082(554)1617

(福 岡) 092(475)1381

●ご注文・お問い合わせは