


PPE 関連製品

袖付きディスポエプロン 袖無しディスポエプロン

患者様とご自身をまもる
感染リスクに応じて使い分け

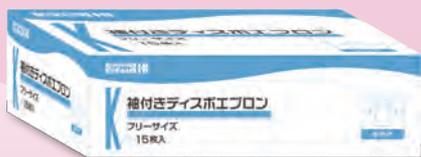

このような時に

フリーサイズ

- 標準予防策として
 - 感染症患者様の対応時など、血液や体液などで汚染される可能性がある時
 - 器具などの洗浄時
- など

製品特長



着衣しやすい 折りたたみ方

効率的で清潔な着衣が可能な折りたたみ方にしています。



ずれあがりにくい サムフックタイプ

袖のずれあがりによる操作性の低下や手首の露出などの心配を減らし、快適な作業が可能です。



水分や菌を通さない 防水性

ポリエチレン製で、血液・体液等の水分や菌を通しません。



作業しやすい 帯電防止加工

エンボス加工（袖付き）、帯電防止加工（袖無し）で、着脱・作業中の動作を邪魔しません。




脱衣しやすい 切れ込み入り首ひも

首ひもに切れ込みがあり、切り離せば簡単に脱衣できます。



袖付きディスポエロン 着脱方法

▼ 着衣

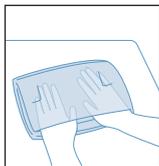

① エプロンを着用する前に手指衛生を行います。



③ エプロンを広げ、そのまま両腕を袖に通します。



⑤ 首の部分をもって、上からかぶります。



⑥ 腰ひもを後ろで結びます。

④ サムフックを親指にかけます。

▼ 脱衣



① 手袋やゴーグルを外した後に、首ひもの切れ込みを切り、脱衣してください。



② エプロンの表面に触れないように注意し、裏返すように脱いでください。



③ 表面が内側になるように丸め、前方に強く引き腰ひもを切り、エプロンの表面に触れないように注意し適切な場所へ廃棄してください。

袖無しディスポエロン 着脱方法

▼ 着衣



① エプロンを着用する前に手指衛生を行います。




③ 腰ひもを後ろで結びます。

② エプロンを外側に向けて広げ、首の部分をもって、上からかぶります。

▼ 脱衣



① 首ひもの後ろ部分に切れ込みがあります。首ひもの部分を持って強く引き首ひもを切ります。

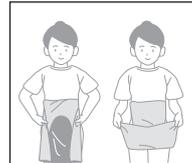

② 腰ひもの高さまでエプロンの表面を中に折り、エプロンの表面に触れないように内側へ折り込んでいきます。



③ 前方に強く引き腰ひもを切り、エプロンの表面に触れないように注意し適切な場所へ廃棄してください。

エプロンの着衣前・脱衣後は手指消毒をしましょう。

ステア®ジェルは頻回に使用してもべとつきにくく、さらっとした使用感なので、すぐに次の作業に移れます。指定医薬部外品 有効成分：エタノール 76.9～81.4vol%



その他のPPEも適宜併用しましょう。

感染経路を遮断して感染リスクを低下しましょう。必要に応じ適宜使い分けられるよう、各種 PPE はラインナップでご準備いただき、併用してください。



コードNo.	品名	規格	標準価格 (税別)	包装	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位:mm)/重量	JANコード
							PFコード
027-175000-00	袖付きディスポエロン	フリー	オープン	15枚/箱	20箱	【個装】80×260×180 約600g	4987601570407
						【ケース】280×740×420 約13.3kg	14987601570404
027-175001-00	袖無しディスポエロン ホワイト	フリー	オープン	50枚/箱	20箱	【個装】60×245×130 約540g	4987601570414
						【ケース】260×540×315 約11.7kg	14987601570411
027-175002-00	袖無しディスポエロン ブルー	フリー	オープン	50枚/箱	20箱	【個装】60×245×130 約540g	4987601570421
						【ケース】260×540×315 約11.7kg	14987601570428
027-175003-00	袖無しディスポエロン ピンク	フリー	オープン	50枚/箱	20箱	【個装】60×245×130 約540g	4987601570438
						【ケース】260×540×315 約11.7kg	14987601570435

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

● お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)
https://www.kawamoto-sangyo.co.jp

(本社) 06(6943)8213

(名古屋) 052(253)6213

(東京) 03(6666)6134

(広島) 082(554)1617

(福岡) 092(402)1875

● ご注文・お問い合わせは