

斜視・弱視 訓練用眼帯

アイパッチ $\frac{A1}{A2}$

☒ しっかり遮光 ☒ つけ外しがしやすい取っ手付き ☒ 個包装で衛生的

10・12枚入り



ふつうサイズ・ホワイト・12枚入



ふつうサイズ・ベージュ・12枚入



大きめサイズ・ホワイト・10枚入



大きめサイズ・ベージュ・10枚入

大容量
タイプ

30・36枚入り



ふつうサイズ・ホワイト・36枚入



ふつうサイズ・ベージュ・36枚入



大きめサイズ・ホワイト・30枚入



大きめサイズ・ベージュ・30枚入

アイパッチ
A1/A2

選べる2種の粘着

通気性に優れており、粘着剤は皮膚刺激性の低いものを使用しています。
ホワイトはベージュよりも粘着力が弱く、肌の弱い方におすすめです。

※すべての方に皮膚刺激が発生しないということではありません

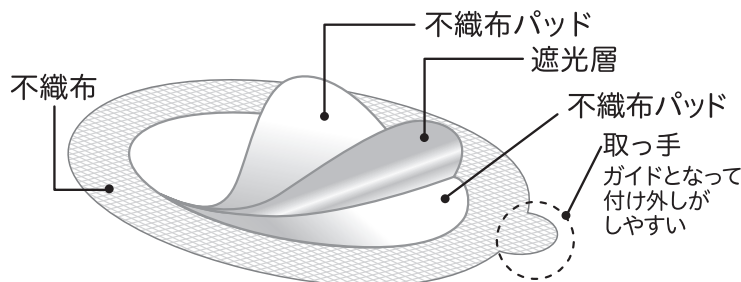
両眼に使用可能

左右どちらの眼にも使用できます。

遮光タイプ

遮光できるタイプですので、各種検査にも使用できます。

【使い方】

①貼る前に、
眼まわりを清潔に
してください。②眼をパッド部で
覆うように貼って
ください。③隙間がなく
貼れたらOKです。【はがし方】※両手を使ってはがしていきます。
【使用上の注意】もあわせてご覧ください片方の指で皮膚を
押さえながら、ゆっくり
丁寧にはがしてください。×片手だけではがさない
×勢いよくはがさない
×皮膚をひっぱらない

サイズ (取っ手を含む)	A1 ふつうサイズ	横幅88mm×縦幅56mm (内側不織布パッド:横幅54mm×縦幅32mm)
	A2 大きめサイズ	横幅94mm×縦幅60mm (内側不織布パッド:横幅63mm×縦幅39mm)

素材	基 布	ポリエステル不織布	ナイロン不織布
	粘 着 剤	アクリル系	アクリル系
	パッド部	レーヨン不織布、アルミ箔	レーヨン不織布、アルミ箔

*アイパッチの貼付による乳幼児の皮膚安全性確認試験実施済み
(すべての方に刺激が起こらないということではありません)

コードNo.	品 名	希望小売価格	ケース入数	サイズ 高さ×幅×奥行(単位mm)/重量	JANコード ITFコード
025-500700-00	アイパッチA-1ホワイト 12Pフツウ	オープン	1枚/包×12包/箱×60箱/ケース	【個装】147×78×23/30.5g 【外箱】285×250×255/2.11kg	4 987601 607868 14987601607865
025-500710-00	アイパッチA-1ベージュ 12Pフツウ	オープン	1枚/包×12包/箱×60箱/ケース	【個装】147×78×23/30.5g 【外箱】285×250×255/2.11kg	4 987601 607844 14987601607841
025-500720-00	アイパッチA-1ホワイト 36Pフツウ	オープン	1枚/包×36包/箱×20箱/ケース	【個装】122×78×53/69.7g 【外箱】262×285×176/1.64kg	4 987601 607905 14987601607902
025-500730-00	アイパッチA-1ベージュ 36Pフツウ	オープン	1枚/包×36包/箱×20箱/ケース	【個装】122×78×53/69.7g 【外箱】262×285×176/1.64kg	4 987601 607882 14987601607889
025-500800-00	アイパッチA-2ホワイト 10Pオオキメ	オープン	1枚/包×10包/箱×60箱/ケース	【個装】147×78×23/30.1g 【外箱】285×250×255/2.09kg	4 987601 607875 14987601607872
025-500810-00	アイパッチA-2ベージュ 10Pオオキメ	オープン	1枚/包×10包/箱×60箱/ケース	【個装】147×78×23/30.1g 【外箱】285×250×255/2.09kg	4 987601 607851 14987601607858
025-500820-00	アイパッチA-2ホワイト 30Pオオキメ	オープン	1枚/包×30包/箱×20箱/ケース	【個装】122×78×53/68.4g 【外箱】262×285×176/1.62kg	4 987601 607912 14987601607919
025-500830-00	アイパッチA-2ベージュ 30Pオオキメ	オープン	1枚/包×30包/箱×20箱/ケース	【個装】122×78×53/68.4g 【外箱】262×285×176/1.62kg	4 987601 607899 14987601607896

【使用上の注意】●使用する眼および装着時間は、眼科医の指示に従ってください。●過敏症の方は、ご使用前に皮膚の柔らかい部位(脇の下や大腿部など)に貼り、かぶれを生じないか確認してください。●本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。●本品を使用中の歩行、特に階段の昇り降りには注意してください。●はがす時に痛みを感じたら、はがすのを止め、再度ぬるま湯などで十分にぬらしてから、ゆっくりはがしてください。●直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。●小児の手の届かないところに保管してください。●本品は使い切りです。くり返しの使用はおやめください。

詳しい使い方・
ラインナップは
ブランドサイトで
紹介しています

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

●お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝日を除く)

https://www.kawamoto-sangyo.co.jp

●ご注文・お問い合わせは