


滅菌用ラップSK

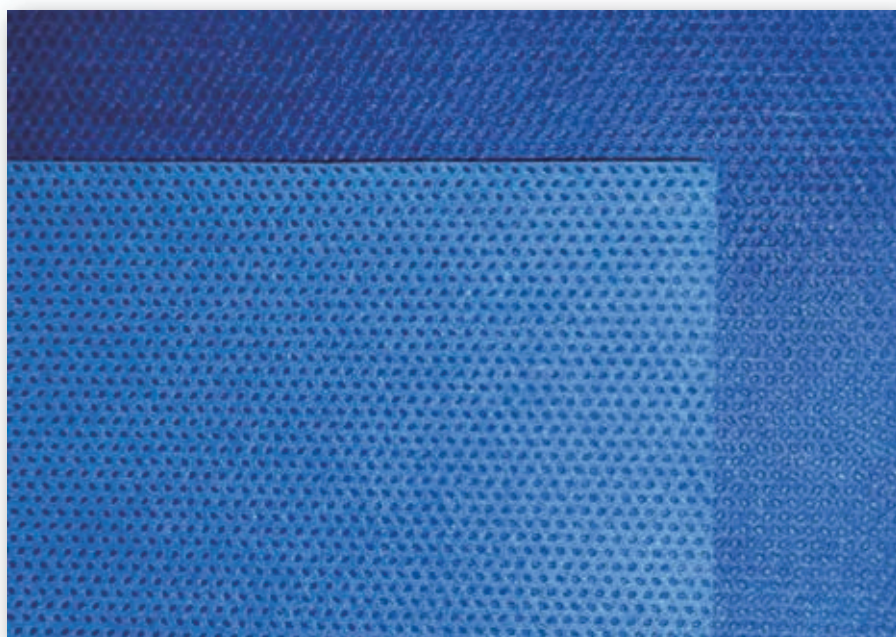

..... 耐重量目安

レギュラータイプ



ヘビータイプ



SMMS製の滅菌用ラップ材です。

レギュラータイプとヘビータイプの2種類で色を分けていますので、梱包物の識別が容易にできます。

AC、EOG、プラズマ滅菌に対応しています。

各種滅菌方法に対応しています >>>

AC

EOG

プラズマ

微生物バリア性


ISO11607-1: 2019
に基づく

引張強度

レギュラー 40N/50mm / ヘビー 74N/50mm
数値が高いほど強度がある
※自社調べ

突き刺し強度

レギュラー 95N / ヘビー 136N
数値が高いほど強度がある
※自社調べ

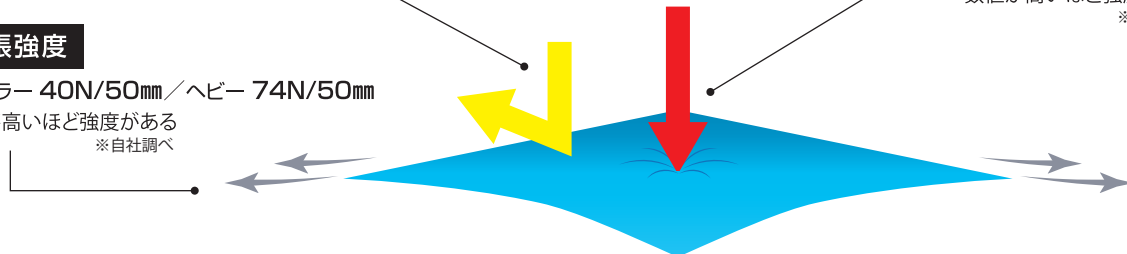

医療従事者向け

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

● お客様相談窓口 ☎ 06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝日を除く)
<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

(本社) 06(6943)8213

(名古屋) 052(253)6213

(東京) 03(6666)6134

(広島・福岡) 082(554)1617


● ご注文・お問い合わせは

物性試験一覧

試験	レギュラー	ヘビー	試験方法	内容	結果の説明
微生物ろ過効率	88%	93.7%	バクテリア飛沫捕集効率 (BFE) 試験: JIS T 9001 5.1.2 準用 *1	寒天培地入のシャーレの上に試料を静置し、その上に細菌懸濁液入りのガラス製チャンパーを置く。チャンパーの上部から圧縮空気を送り、試料を通過して寒天培地に付着した細菌数を数え、試料の捕集割合を算出する。	数値が高いほど防御性能が優れていることを示す。
引張試験	4.2Kgf	7.6Kgf	引張強さ: JIS L1912 6.4準用 *2	幅50mmの試料を100mm/minの試験速度で引張る。最大荷重を試料の引張強さとする。 ※縦方向または横方向の結果の悪い方を示す。	数値が高いほど生地強度が優れていることを示す。
耐リント性試験	粒子数23個 *10μm以上	粒子数1個 *10μm以上	タンプリング法試験: JIS B 9923準用 *3	試料をドラム試験機に投入し、1立方フィート/分の速度で回転させ発塵させる。1分間ずつ計5回連続して測定して平均値を発塵数とする。 *検体サイズ 100cm×100cm	数値が低いほどリントが少ないことを示す。
静水圧試験	340mmH ₂ O	745mmH ₂ O	AATCC127耐水性-静水圧試験 *4	昇圧速度60cm/minまたは10cm/minで試験片に水圧をかけて、水滴が3滴出水した時点の水圧を測定する。	数値が高いほど撥水性が高いことを示す。
燃焼性試験	区分3	区分3	45° ミクロバーナー法試験: JIS L 1091 A-1法 *5	試料を45°の角度で保持し、1分間火をあてて燃焼させる。 区分1: 燃焼面積45cm ² 以上かつ残炎時間3秒以上 区分2: 燃焼面積45cm ² 以上かつ残炎時間3秒以下 区分3: 燃焼面積30cm ² 以下かつ残炎時間3秒以下	区分が大きいほど難燃性が高いことを示す。


*1*3*5 カケンテストセンター調べ *2 自社調べ *4 テストレポート引用

滅菌用ラップSK レギュラー

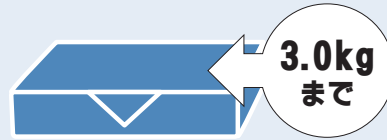

コードNo.	耐重量目安	規格	サイズ	希望小売価格	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位mm) 重量	JANコード
							ITFコード
027-191010-00	3kgまで	レギュラー	60cm×60cm	オープン	250枚/袋X2袋	270X360X630	4987601582172
						約7.2kg	14987601582179
100枚/袋X3袋					360X420X430	4987601582189	
					約7.7kg	14987601582186	
100枚/袋X3袋					360X480X480	4987601582196	
					約9.7kg	14987601582193	
50枚/袋X2袋	200X450X630	4987601582219					
	約5.9kg	14987601582216					
50枚/袋X2袋	220X510X730	4987601582226					
	約8.2kg	14987601582223					

滅菌用ラップSK ヘビー

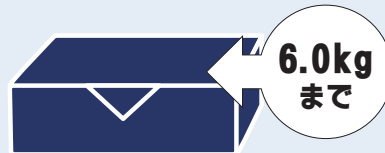

コードNo.	耐重量目安	規格	サイズ	希望小売価格	ケース入数	高さ×幅×奥行(単位mm) 重量	JANコード
							ITFコード
027-190011-00	6kgまで	ヘビー	90cm×90cm	オープン	75枚/袋X2袋	240X480X480	4987601582127
						約8.5kg	14987601582124
50枚/袋X1袋					160X450X630	4987601582141	
					約5.3kg	14987601582148	
50枚/袋X1袋					260X380X500	4987601582158	
					約7.0kg	14987601582155	